

ESTELITE ASTERIA

КЛИНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
Д-Р НОБОРУ ТАКАХАШИ (ЯПОНИЯ)



Перевод С.Н. Власовой
Под редакцией Е.Ю. Мендоса, Е.В. Мининой

ВВЕДЕНИЕ

ESTELITE ASTERIA разработан для создания высокоэстетичных композитных реставраций по упрощенной 2-этапной методике. Основной Набор **ESTELITE ASTERIA**, состоящий всего из 5 оттенков **Body** и 2-х эмалевых оттенков, позволяет воссоздавать все разнообразие цвета естественных зубов. Благодаря своим инновационным оптическим свойствам оттенки **Body** превосходно гармонируют с тканями зуба при минимальной ширине эмалевого скоса.

Оттенки **Body** обладают определенной прозрачностью в сочетании с достаточной опакостью, что позволяет избежать просвечивания темноты полости рта без использования опаков (дентинов). **A1 – A4** **Body** подходят для большинства естественных зубов. Дополнительные оттенки **Body: BL** – для отбеленных зубов, **B3B** – для желтоватых зубов.

Эмалевые оттенки имеют прозрачность, близкую к прозрачности естественной эмали. Для передних зубов в основном используется **NE (Natural Enamel)**, для окклюзионной поверхности боковых зубов – **OcE (Occlusal Enamel)**. З дополнительных эмалевых оттенка (вместо **NE**) используются в следующих случаях: **TE (Translusend Enamel)** – для передних зубов, обладающих высокой прозрачностью, **WE (White Enamel)** – для светлых отбеленных зубов и **YE (Yellow Enamel)** – для зубов с дисколоритами или оранжеватой (желтоватой) эмалью.

Концепция послойного восстановления и система подбора оттенков разработана доктором Noboru Takahashi.

ESTELITE ASTERIA:

ОТТЕНКИ BODY	ОСНОВНЫЕ A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ BL, B3B
ЭМАЛЬ	NE, OcE	TE, WE, YE

МАТЕРИАЛ ESTELITE ASTERIA

МАТЕРИАЛ ESTELITE ASTERIA обладает оптическими свойствами, которые позволяют создавать высокоэстетичные реставрации. В нем использованы уникальные запатентованные компоненты: наполнитель и инициатор полимеризации **Tokuyama**.

ESTELITE ASTERIA содержит 82% по весу (71% по объему) кремний-циркониевого наполнителя. Частицы неорганического наполнителя, содержащегося в **ESTELITE ASTERIA**, имеют сферическую форму (средний размер частиц 200 нм). Этот супранано-сферический наполнитель позволяет получить очень гладкую поверхность с превосходным блеском, который легко достигается при полировке и сохраняется длительное время. Высокая степень наполненности композита обеспечивает низкую полимеризационную усадку и повышенную устойчивость к истиранию.

Технология ускорения фотополимеризации (Radical-Amplified Photopolymerization initiator technology – RAP technology), используемая в материале **ESTELITE ASTERIA**, обуславливает быструю полимеризацию и более длительное рабочее время (устойчивость к свету рабочего светильника).


ESTELITE ASTERIA очень удобен в работе, не липнет к инструменту и легко моделируется.



Сканирующая электронная микрография сферического наполнителя.

ВЫБОР ОТТЕНКА РЕСТАВРАЦИИ	4
ШЛИФОВАНИЕ И ПОЛИРОВАНИЕ РЕСТАВРАЦИИ	6
РЕСТАВРАЦИИ БОКОВЫХ ЗУБОВ	8
ЗАКРЫТИЕ ДИАСТЕМЫ	17
РЕСТАВРАЦИЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ	20
ПРИШЕЕЧНЫЕ РЕСТАВРАЦИИ	26
КОМПЛЕКТАЦИЯ	28

ВЫБОР ОТТЕНКА РЕСТАВРАЦИИ

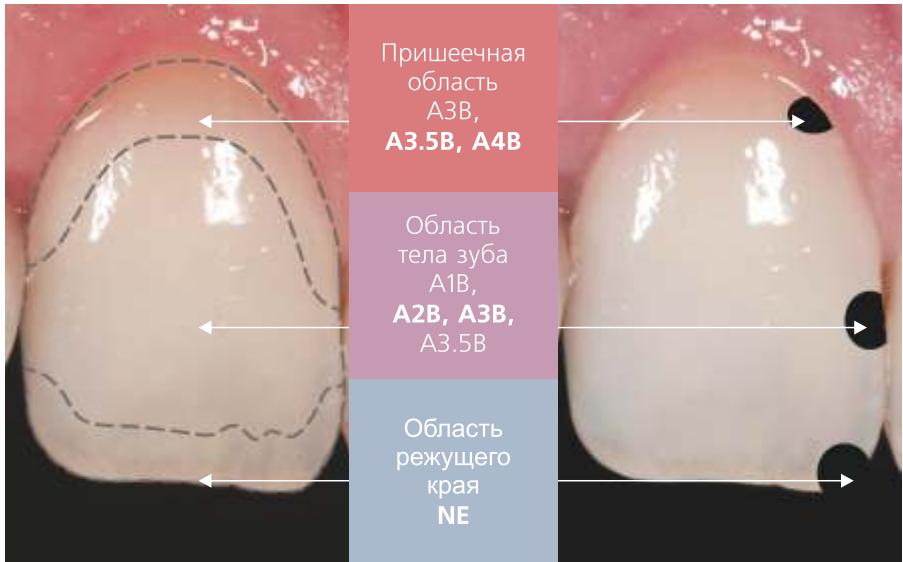

Методика реставрации одним оттенком.

Оттенки, выделенные жирным шрифтом, настоятельно рекомендуются.

Реставрация одним оттенком с использованием материала **ESTELITE ASTERIA** рекомендуется для небольших полостей на передних зубах и на щечных поверхностях боковых зубов.

Выбор оттенка может быть обусловлен локализацией кариозной полости или дефектной реставрации. В пришеечной области и области тела зуба предпочтительно использовать оттенки **Body**, для области режущего края – оттенок **NE**.

При наличии обширных полостей наилучший эстетический результат достигается при использовании методики реставрации двумя оттенками материала. В этом случае реставрация состоит из оттенка **Body** и оттенка **NE**. Эмалевые оттенки **WE**, **YE** и **TE** используются вместо **NE** в определенных случаях (**WE** – белая эмаль, **YE** – эмаль, измененная в цвете, **TE** – эмаль, обладающая высокой степенью прозрачности).

Определение цвета боковых зубов будет описано в главе о реставрации боковых зубов.

Выбор оттенка реставрации возможен с помощью **шкалы Vita***, либо нанесения небольшого количества материала на зуб (метод "горошины"), либо с помощью **шкалы оттенков ESTELITE ASTERIA**.



Шкала Vita.



Метод "горошины".



Индивидуально изготовленная шкала оттенков
ESTELITE ASTERIA.

ПРИШЕЕЧНАЯ ОБЛАСТЬ:



A3B



A3.5B



A4B

ОБЛАСТЬ ТЕЛА ЗУБА:



BL



A1B



A2B



A3B



A3.5B



B3B

ОБЛАСТЬ РЕЖУЩЕГО КРАЯ:



NE



WE



YE



TE

Рекомендуемые оттенки.

Оттенки, выделенные жирным шрифтом, настоятельно рекомендуются.

* Vita не является зарегистрированной торговой маркой
TOKUYAMA DENTAL CORPORATION.

ШЛИФОВАНИЕ И ПОЛИРОВАНИЕ РЕСТАВРАЦИИ

ESTELITE ASTERIA великолепно полируется и долго сохраняет блеск. Зеркальный блеск поверхности достигается легко и быстро. **Ниже представлена** 3-этапная методика окончательной обработки реставрации. Другие удобные методики, такие, как 1-этапная с использованием резиновых головок, также будут эффективны.

ПРИДАНИЕ ФОРМЫ И КОНТУРИРОВАНИЕ.



1

Избыток композита можно удалить с помощью скальпеля.

Для контурирования реставрации используют мелкозернистые алмазные боры.

ПЕРВИЧНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ.



2

Первичное полирование выполняется резиновыми полировочными головками.

Полирование аппроксимальных поверхностей осуществляется с помощью абразивных полосок.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ.

Окончательное полирование производится с помощью различных инструментов. **Ниже приводятся примеры** полировочных инструментов, каждый из которых может с успехом применяться сам по себе, либо в комбинации с другими.



3

Импрегнированная карбидом кремния силиконовая щеточка.



Экстра-тонкий полировочный диск.




Войлочный диск с алмазной полировочной пастой на основе оксида алюминия.

РЕСТАВРАЦИИ БОКОВЫХ ЗУБОВ

С помощью **ESTELITE ASTERIA** можно очень просто осуществить высокоэстетичные реставрации боковых зубов. Оттенок **OcE (Окклюзионная Эмаль)** позволяет воссоздавать цвет и морфологию жевательной поверхности боковых зубов). Он хорошо моделируется и подходит по цвету к большинству жевательных зубов. Таким образом, **при реставрации жевательных поверхностей нет необходимости в подборе цвета.**


Существует 2 методики послойного восстановления в зависимости от глубины полости. В неглубоких полостях реставрации могут быть выполнены одним оттенком **OcE**; в глубоких — с помощью комбинации оттенков **A3.5B** и **OcE**.

РЕСТАВРАЦИЯ НЕГЛУБОКОЙ ПОЛОСТИ I КЛАССА. ОДНОСЛОЙНАЯ ТЕХНИКА.

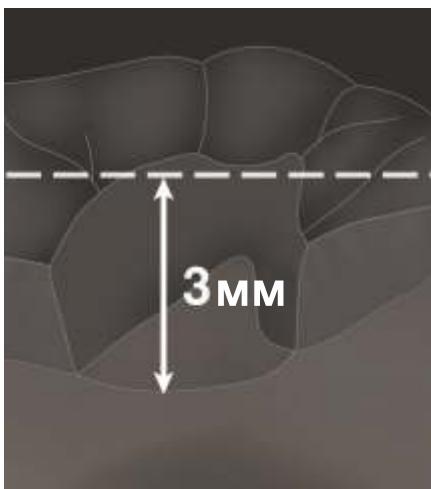



1

После препарирования полости мысленно проведите линию между вершинами бугров. Если глубина полости от этой линии 3 – 3,5 мм, то полость неглубокая. Далее выполните протравливание эмали и адгезивную подготовку.

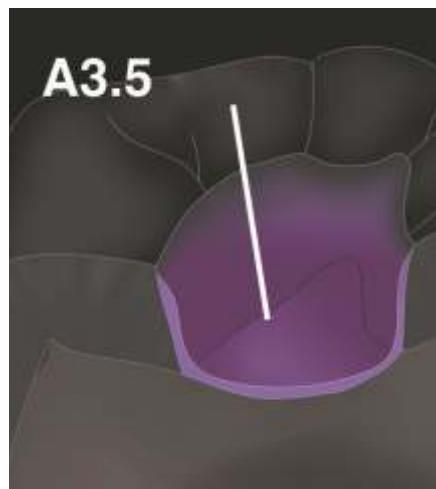

2

Текущий композит оттенка **A3.5** тонким слоем нанесите на дно и стенки полости. Всегда используйте оттенок **A3.5**. Идеальная толщина слоя текучего композита 0,2 – 0,3 мм. Фотополимеризуйте согласно инструкциям производителя.

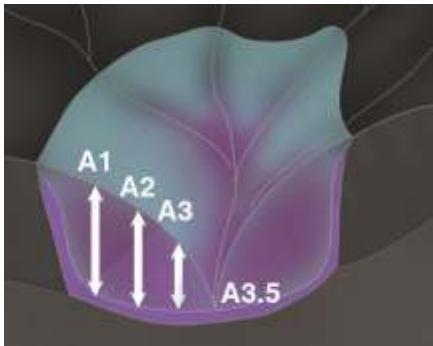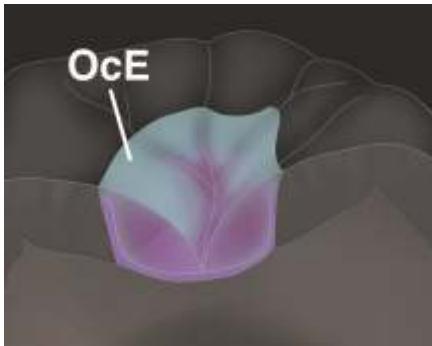

3

Небольшое количество материала оттенка **OcE** внесите в полость и моделируйте с воссозданием анатомии жевательной поверхности. В глубине фиссуры не перекрывают материалом **OcE**, чтобы был виден цветоносыщеный оттенок текучего композита **A3.5**. Полимеризуйте материал 10 секунд и приступайте к окончательной обработке реставрации.

Оттенок **OcE** полупрозрачен. Светлота реставрации возрастает с увеличением толщины слоя материала (оттенка **OcE**). Поляхроматичность реставрации может достигаться с помощью трехмерного эффекта и без использования композитных красителей при моделировании.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. ПОВЕРХНОСТНЫЙ ФИССУРНЫЙ КАРИЕС I КЛАССА.



1

После препарирования полости эмаль протравлена при помощи геля **TOKUYAMA ETCHING GEL HV** в течение 5 – 15 секунд. Гель смывается водой, полость высушена. Нанесен адгезив **TOKUYAMA EE-BOND**.

РЕСТАВРАЦИИ БОКОВЫХ ЗУБОВ



2

С помощью зонда отмечена вспомогательная линия между вершинами бугров. Глубина полости измерена с помощью калиброванного пародонтологического зонда. Расстояние равно 3 мм.



3

Небольшое количество текущего композита оттенка **A3.5** нанесено на дно и стенки полости.



4


Порцию материала **OcE** внесли в полость и моделировали с воссозданием естественной анатомии жевательной поверхности. Смоделированы бороздки тонким зондом. Фотополимеризация 10 секунд.



5

Окончательный вид реставрации.
Реставрация, выполненная по упрощенной 1-этапной методике, позволила получить идеальный эстетический результат.

РЕСТАВРАЦИЯ ГЛУБОКОЙ ПОЛОСТИ I КЛАССА. 2-СЛОЙНАЯ ТЕХНИКА [ДВУХЭТАПНАЯ МЕТОДИКА].

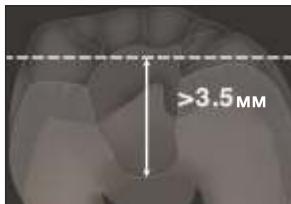


1

После препарирования полости мысленно проводится вспомогательная линия между вершинами бугров. В глубокой полости расстояние между этой линией и дном полости составляет более 3,5 мм. Затем проправливается эмаль и наносится адгезив.



2

Текущий композит тонким слоем наносится на дно и стенки полости. Идеальная толщина слоя текущего композита 0,2 – 0,3 мм. Полимеризуется согласно инструкциям производителя.

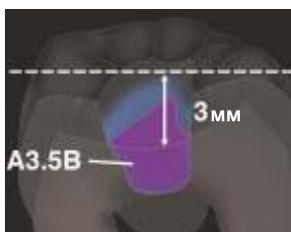

3

Порция материала **A3.5B** наносится на дно полости и адаптируется плоско. Этому слою не надо придавать форму естественного дентина. Расстояние от вспомогательной линии между вершинами бугров до уровня **A3.5B** должно быть 3 мм. Полимеризация 10 или более секунд.



4

Материал оттенка **OcE** вносится в полость и моделируется с воссозданием естественной анатомии жевательной поверхности. Область глубоких фиссур не перекрываеться материалом **OcE**, чтобы был виден насыщенный оттенок текущего композита **A3.5**. Полимеризация 10 секунд. Окончательная обработка реставрации.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. ПОЛОСТЬ I КЛАССА СРЕДНЕЙ ГЛУБИНЫ.



1

После нанесения на дно и стенки полости текучего композита оттенок **A3.5B** вносится в полость и распределяется штраффером по дну до создания более-менее плоской поверхности.

2

Расстояние от вспомогательной линии между вершинами бугров до уровня материала **A3.5B** должно быть 3 мм. Далее полость восстанавливается как неглубокая. Полимеризация 10 или более секунд.



3

Оттенок **OcE** внесен в полость и отмоделирован с помощью инструментов, кистей, тонких зондов. Поляхроматичность реставрации достигается без использования окрашивающих композитов.


РЕСТАВРАЦИЯ ПОЛОСТЕЙ II КЛАССА. СРЕДНИЕ И ГЛУБОКИЕ ПОЛОСТИ.

При реставрации полостей II класса необходимо сначала перевести их из II класса в I класс, восстановив аппроксимальную стенку.




1

Выполнено протравливание эмали и нанесен адгезив. После нанесения текущего композита на дно и стенки полости аппроксимальную стенку начинают восстанавливать тонким слоем оттенка **NE** или **WE**. Полимеризация 10 и более секунд.

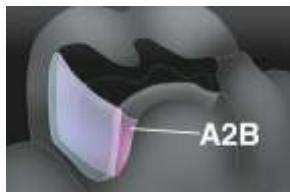


2

Далее аппроксимальная часть полости заполняется оттенком **Body**; рекомендуется оттенок **A2B**. Полимеризация 10 или более секунд.

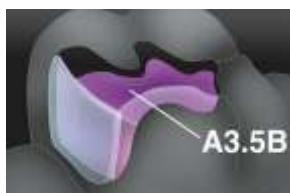

3

Далее полость восстанавливается как полость I класса.

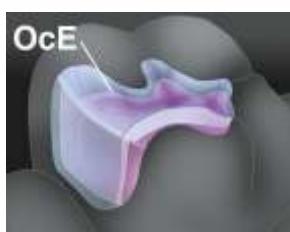

4

Материал оттенка **OcE** вносится в полость и моделируется с воссозданием естественной анатомии жевательной поверхности. Область глубоких фиссур не перекрывается материалом **OcE**, чтобы был виден насыщенный оттенок текущего композита **A3.5**. Полимеризация материала 10 секунд. Окончательная обработка реставрации.

РЕСТАВРАЦИИ БОКОВЫХ ЗУБОВ

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ.



1

Вид окклюзионной поверхности 1-го верхнего моляра до лечения. Дефект реставрации и аппроксимальный кариес.



2

После консервативного препарирования полости выполнено протравливание эмали, нанесен адгезив.



3

После нанесения текучего композита на дно и стенки полости установлена межзубная матрица, клин и кольцо матричной системы. Восстановление контактной стенки оттенком **WE** (можно заменить на **NE**).



4

Восстановление аппроксимальной части полости завершается с помощью оттенка **Body**. Рекомендуется оттенок **A2B**. Полимеризация материала 10 секунд. Далее полость восстанавливается как полость I класса.



5

Небольшое количество оттенка **OcE** вносится в полость и моделируется. Полимеризация 10 или более секунд. Окончательная обработка реставрации.




6

Окончательный вид реставрации.
Функциональная и эстетичная реставрация создана очень простым и эффективным способом.

РЕСТАВРАЦИИ БОКОВЫХ ЗУБОВ


РЕСТАВРАЦИЯ ПОЛОСТЕЙ II КЛАССА. НЕБОЛЬШИЕ ПОЛОСТИ.

Для небольших полостей II класса эффективна методика восстановления одной порцией. Для этого рекомендуются оттенки **Body**.

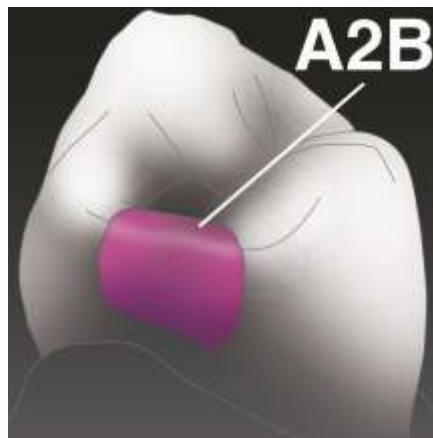

Для небольших аппроксимальных полостей (глубиной до 2 мм) рекомендуется восстановление полости одной порцией композита оттенка **Body**. Рекомендуются оттенки **A2B** или **A1B**.

ЗАКРЫТИЕ ДИАСТЕМЫ

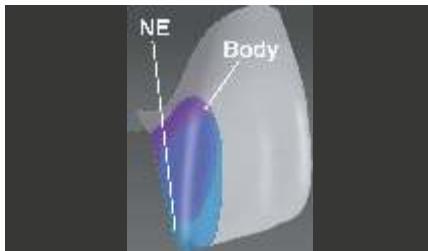

Закрытие диастемы выполняется двумя слоями, для этой упрощенной методики используются оттенки **Body** и **NE**.

Закрытие более узкой диастемы может быть выполнено с помощью всего 1 слоя оттенка **NE**.



1

На вестибулярной поверхности зуба до лечения видна диастема и дефект реставрации. После удаления старой реставрации и создания шероховатости на эмали с помощью абразивной пасты или эндолистера проводится протравливание эмали.

Протравливающий гель **TOKUYAMA ETCHING GEL HV** наносится на 5 – 15 секунд. Гель смывается водой, полость высушивается.




Адгезив **TOKUYAMA EE-BOND** наносится на 10 секунд.

ЗАКРЫТИЕ ДИАСТЕМЫ




2

Сушка слабой струей воздуха в течение 5 секунд, затем более сильной струей в течение 5 секунд. Полимеризация 10 секунд.

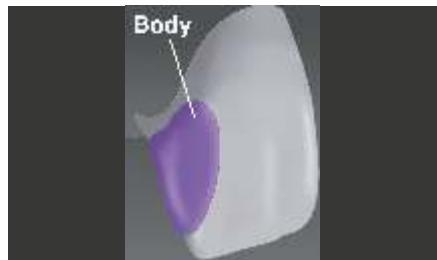


3

Нанесен и отмоделирован композит подходящего оттенка **Body**. Оставлено место для следующего слоя в более прозрачной области режущего края.

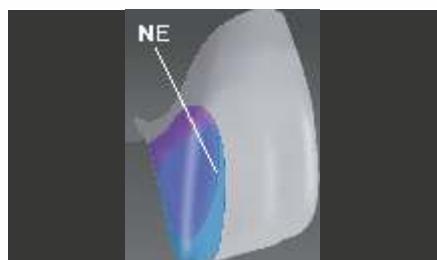

4

После полимеризации в течение 10 секунд (**A4B** – 20 секунд) наносится и моделируется слой **NE**. Не рекомендуется перекрывать пришеечную треть, смоделированную из оттенка **Body**, материалом **NE**. Полимеризация 10 секунд.

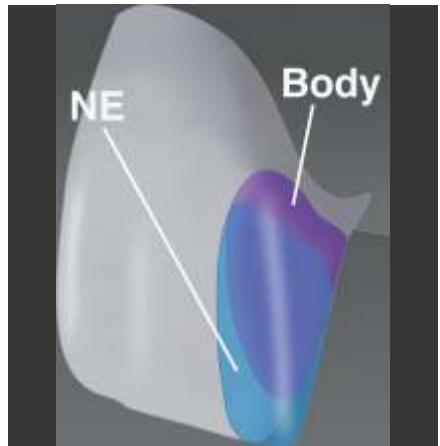

5

Таким же образом выполняется реставрация на соседнем зубе.
Для адаптации последней порции оттенка NE используется кисть **TOKUYAMA DENTAL BRUSH №24.**



6

Окончательный вид реставрации (после шлифовки и полировки).
Обратите внимание на незаметность границ реставрации и естественную прозрачность в области режущего края.
Реставрация, выполненная в технике минимально инвазивного препарирования,
является эстетичной и функциональной.

РЕСТАВРАЦИЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ

РЕСТАВРАЦИЯ ПОЛОСТЕЙ IV КЛАССА.





Реставрации полостей IV класса также выполняются одним или двумя оттенками. В упрощенной технике обязательно создание скоса вестибулярной эмали.




1

Реставрацию полостей IV класса обычно начинают с внесения в полость небольшого количества оттенка **Body**. Область скоса также перекрывается оттенком **Body**. Это делает незаметной границу пломба-зуб. Оставьте место для материала **NE** в более прозрачной области режущего края.

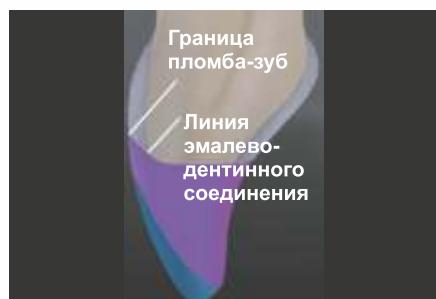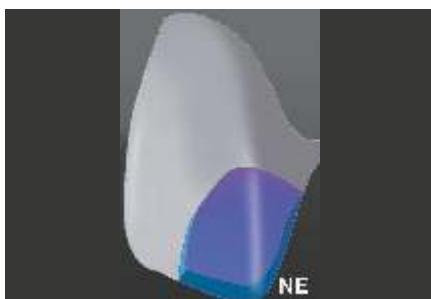


2

После полимеризации последняя порция материала **NE** наносится на прозрачную область режущего края и моделируется для придания окончательной анатомической формы.

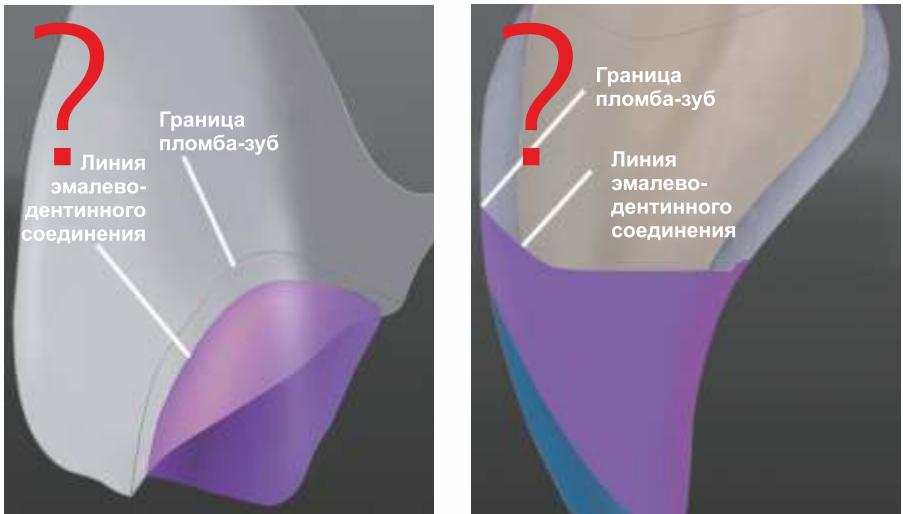


Если порция материала оттенка **Body** доходит только до линии дентинно-эмалевого соединения, это может ухудшить эстетический результат. Стратегия послойного нанесения Estelite Asteria отличается от других композитных систем.

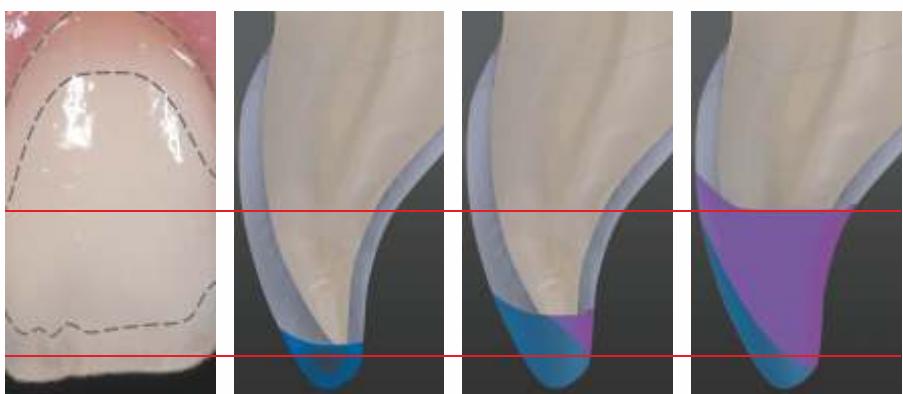

В случаях, когда дефекты локализованы в прозрачной области режущего края, реставрация должна быть выполнена только из оттенка **NE**. Если дефекты не обширны, то для сохранения необходимой прозрачности в области режущего края количество материала оттенка **Body** должно быть ограничено.


РЕСТАВРАЦИЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ.

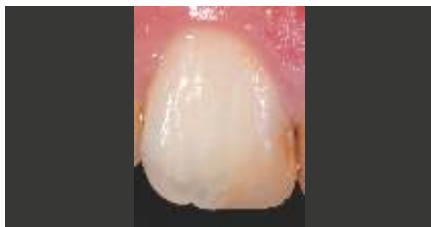


1

На вестибулярной поверхности правого центрального резца – дефектная, измененная в цвете композитная реставрация полости IV класса.

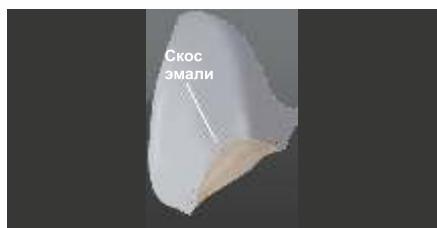

2


После удаления дефектной реставрации и кариозных тканей сформирована полость со скосом. Далее проправливание эмали и нанесение адгезива.

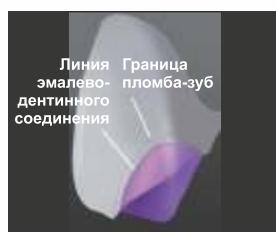

3

Порция материала оттенка **Body** внесена в полость и отмоделирована. Оттенок **Body** должен перекрывать эмалевый скос. Оставлено место для следующей порции в прозрачной области режущего края. В данном случае были сформированы дентинные мамеллоны, что не является обязательным. Полимеризуйте 10 секунд (**A4B** – 20 секунд).

Небная стенка может быть сформирована заранее с помощью техники силиконового ключа, например, с помощью оттенка **NE**.

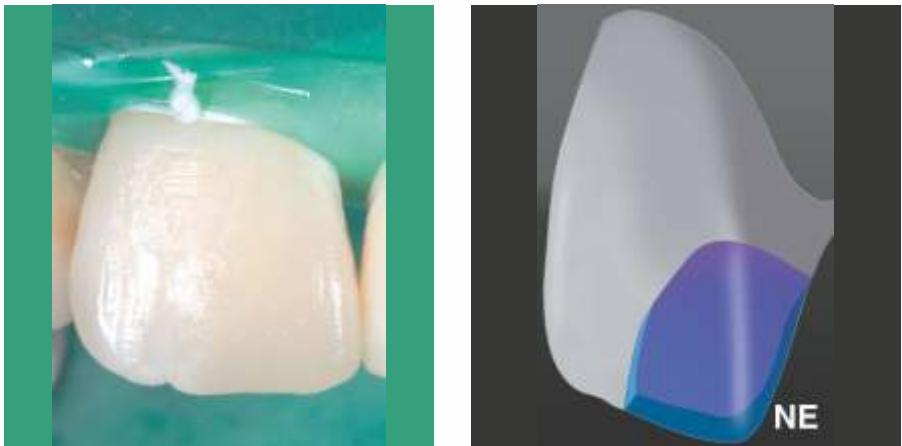

4

Небольшое количество материала оттенка **NE** наносится на область режущего края и моделируется для придания окончательной анатомической формы. Верхний слой материала разглаживается кистью. Полимеризация 10 секунд.



5

Окончательный вид реставрации.

Обратите внимание на незаметность границы реставрации и естественную прозрачность в области режущего края. Завершенная реставрация, выполненная в малоинвазивной технике. Гармоничное сочетание эстетичности и функциональности.


РЕСТАВРАЦИЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ

РЕСТАВРАЦИЯ ПОЛОСТЕЙ III КЛАССА.

Реставрации полостей III класса также выполняются одним или двумя оттенками в упрощенной технике. Основной оттенок — **Body**, независимо от размера полости.



В тех случаях, когда необходима высокая прозрачность, на слой **Body** наносится слой **NE**.

1-ОТТЕНОЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ.

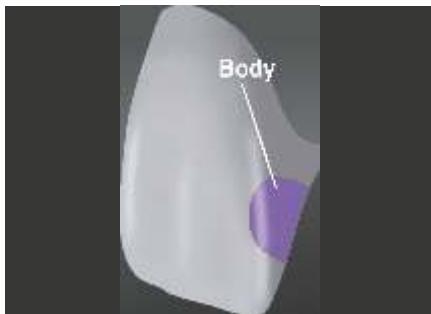

Для восстановления большинства полостей III класса достаточно одного оттенка **Body**. Оттенки **Body** обладают как достаточной опакостью, чтобы предупредить просвечивание темной полости рта, так и определенной прозрачностью, чтобы имитировать вид естественной эмали.

2-Х ОТТЕНОЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ.

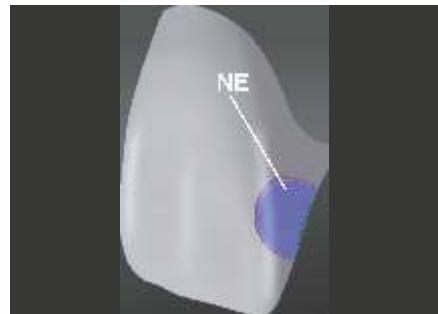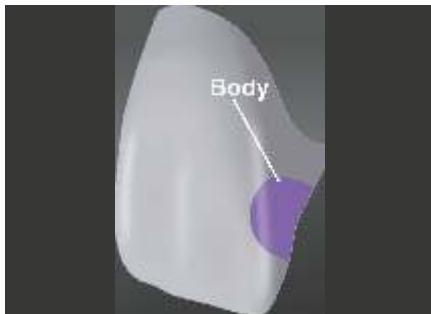

В случаях, когда необходима высокая прозрачность поверхности, на слой оттенка **Body** наносится тонкий слой **NE**. Важно, что первый слой оттенка **Body** должен полностью перекрывать скос эмали.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ.



1

Вестибулярная поверхность верхних центральных резцов до лечения.
Дефектные, измененные в цвете композитные реставрации.



2

После удаления дефектных реставраций и кариозных тканей эмаль проправливается, наносится и полимеризуется адгезив. Этому пациенту было сделано отбеливание зубов, затем в качестве первого слоя был выбран оттенок **BL Body**.



3

BL Body вносится в полость и полимеризуется. Затем наносится тонкий слой оттенка **NE**. После полимеризации реставрация шлифуется и полируется.
Окончательный результат демонстрирует соответствующую светлоту и гладкость поверхности реставрации.

РЕСТАВРАЦИЯ ПОЛОСТЕЙ V КЛАССА.

Реставрации полостей V класса также выполняются одним или двумя оттенками в упрощенной технике. Они должны быть выполнены в основном из оттенка **Body**, независимо от размера полости. В тех случаях, когда необходима более высокая прозрачность, на слой **Body** наносится тонкий слой материала оттенка **NE** или **YE**.

2-Х ОТТЕНОЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ.



1

Вестибулярная поверхность верхнего клыка до лечения. Сочетание кариеса и некариозного поражения.




2

После изоляции коффердамом и установки ретракционной нити выполняется препарирование полости. В случае обширных полостей делается скос эмали шириной 1,5 мм. Для большинства обычных полостей V класса скос не обязателен из-за высокой способности **ESTELITE ASTERIA** сливаться с тканями зуба.




3

При необходимости проводится аппликация хлоргексидина, затем протравливание эмали, нанесение и полимеризация адгезива. Текущий композит тонким слоем наносится на дно и стенки полости. Выбираются насыщенные тона **Body** (**A3B**, **A3.5B**, **A4B**), вносятся в полость и моделируются. Порция материала оттенка **Body** должна перекрывать весь скос эмали. Полимеризация 10 секунд (**A4B** – 20 секунд).

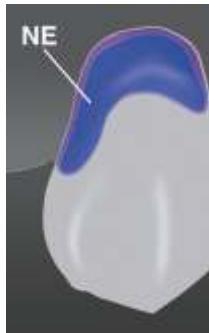

4

В качестве заключительного слоя наносится оттенок **NE** и распределяется тонким слоем. Полимеризация 10 секунд. Шлифование и полирование реставрации.

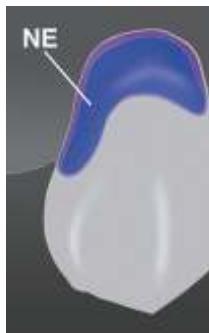

5

Окончательный вид реставрации. Обратите внимание на гармоничное сочетание эстетичности и функциональности.

1-ОТТЕНОЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ.



1

Вид зуба, восстановленного одним оттенком (**A3.5B**). В большинстве случаев отличный эстетический результат может быть достигнут с помощью упрощенной методики реставрации одним слоем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МАТЕРИАЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ ESTELITE, В НАБОРАХ И В ОТДЕЛЬНЫХ УПАКОВКАХ:



НАБОР

ESTELITE ASTERIA SYRINGE ESSENTIAL KIT:

7 ШПРИЦЕВ С МАТЕРИАЛОМ, ОТТЕНКИ: A1B, A2B,

A3B, A3.5B, A4B, NE, OCE

5 ОТТЕНКОВ BODY: A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B

+ 2 ОТТЕНКА ЭМАЛИ: NE и OCE

1 ШПРИЦ: 4,0 гр (2,1 мл)

10 наиболее востребованных комбинаций!



ESTELITE ASTERIA SYRINGE:

A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B3B, BL, NE, WE, YE, TE, OCE

ОТТЕНКИ BODY: A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B3B, BL

ЭМАЛЕВЫЕ: NE, WE, YE, TE, OCE

1 ШПРИЦ: 4,0 гр (2,1 мл)



КОМПОЗИТНЫЕ КРАСИТЕЛИ

НАБОР ESTELITE COLOR KIT:

13 ШПРИЦЕВ С МАТЕРИАЛОМ, ОТТЕНКИ: Clear, White, Blue, Yellow, Gray, Ochre, Dark Brown, Red, Lavender, Pink Opaque, Medium Chroma Opaque, Low Chroma Opaque

НАКОНЕЧНИКИ: 15 шт.

КОЛЛАПСИИ: 15 шт.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ ПЛАНШЕТЫ: 5 шт.

СВЕТОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН: 1 шт.

1 ШПРИЦ: 0,9 гр (0,5 мл)



НАБОР ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ

ESTELITE ASTERIA CUSTOM SHADE GUIDE:

ШКАЛА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОТТЕНКОВ С НАКЛЕЙКОЙ: 1 шт.

ФОРМА: 1 шт.

ЛОПАТКИ: 15 шт.



КИСТОЧКИ BRUSH № 24: 5 шт.

**Идеально подходят для нанесения
композитов и красителей.**



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
8 (812) 635-88-90
МОСКВА:
8 (495) 737-38-51

INFO@PROTECODENT.RU
WWW.PROTECODENT.RU

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2016 г.

